


Viktige Trinn Ved Bruk av A1CNow[®]+ System

A1CNow[®]+ SYSTEM


Gå gjennom den profesjonelle veiledningsprosedyren til A1CNow⁺ for full testing før du benytter denne forkortede veiledningen.

1 Klargjør for test – Kontroller at LOT nummerene er like og åpne posen 1*

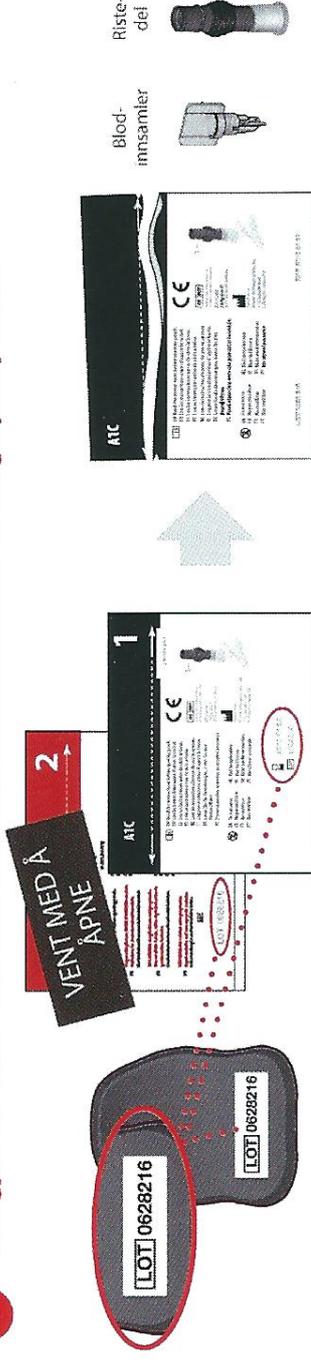


VIKTIG:
Ikke åpne Pose 2 før Trinn 3 som beskrevet nedenfor

2 Samle inn riktig mende blod

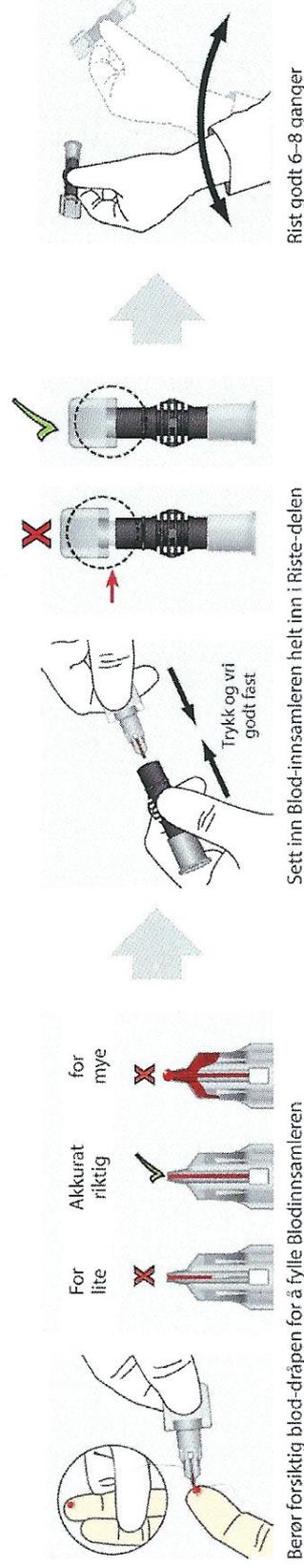

3 Åpne Pose 2. Sett inn kasetten og vent på at SMPL-meldingen vises og dispenser prøven

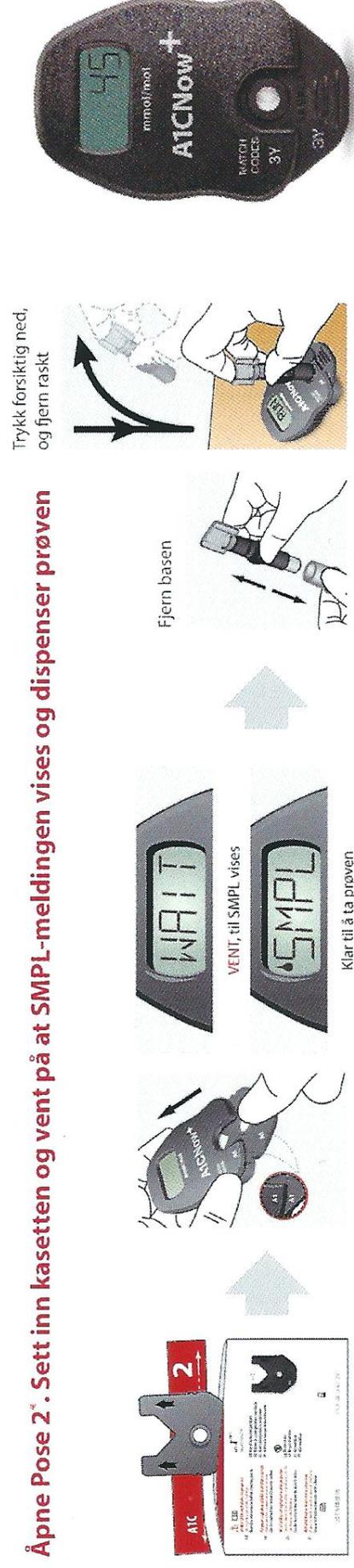

* Posens illustrasjoner kan variere.

FEILSØKING

Se tabellen under for A1CNow⁺ sine drifts- og feilkoder (OR = Utenfor område ; QC = Kvalitetskontroll; E = Analysator feil)

MELDING	BESKRIVELSE OG LØSNING
OR 1	Blodprøven kan ha for lite hemoglobin (mindre enn 20% hematokrit), ikke nok blod ble samlet inn, eller blodet var ikke godt nok blandet inne i riste-delen (shakeren). ** Du vil kanskje sjekke hematokrit med en annen metode.
OR 2	Blodprøven kan ha for mye hemoglobin (større enn 60% hematokrit), eller overskudd av blod ble innsamlet. ** Du vil kanskje sjekke hematokrit med en annen metode.
OR 3	Blodprøven kan ha for lite A1C, eller det er ikke innsamlet nok blod. **
OR 4	Blodprøven kan ha for mye A1C, eller for mye blod ble innsamlet. **
OR 5	Temperaturen i Analysatoren er under 18 °C (64 °F). Gjenta testen ved romtemperatur (18-28 °C).
OR 6	Temperaturen i Analysatoren er over 28 °C (82 °F). Gjenta testen ved romtemperatur (18-28 °C).
<20	A1C er mindre enn 20 mmol / mol.
>120	A1C er større enn 120 mmol / mol.
QC 2	Oppstår når du setter inn en testkasett som allerede har en innlagt prøve i seg. Ikke fjern og repeter innsetting av testkassetten etter at du har lagt inn en prøve. **
QC 6	Prøven ble lagt til i testkassetten før "SMPL" på displayet. Dette teller ned en test i analysatoren. Fjern og kassér testkassetten. For å unngå denne feilen må du ikke legge til en prøve før "WAIT" er erstattet med "SMPL" i displayet.
QC 7	Testkassetten ble liggende i analysatoren uten prøvetilsetning i 2 minutter etter at "SMPL" vist i displayet. Dette teller ned en hel test i analysatoren. Kast testkassetten og sett inn en helt ny en når du er klar til å dispensere riste-delen.
QC 30 to 33	Analysatoren var ikke i stand til å utføre en gyldig innledende lesing. Pass på at du fjerner riste-delen innen ett sekund etter at du har dispensert den inn i prøveporten, og ikke forstyrr analysatoren mens testen kjører. **
QC 50 to 51 QC 55 to 56	Utilstrekkelig prøve ble lagt i testkassetten. For å unngå denne feilen må du sørge for at blodinnsamleren settes helt inn i riste-delen og rist umiddelbart. **
All other QC codes	Kvalitetskontrollen ble ikke godkjent. Testen må repeteres med en annen testkasett og riste-sett.
E1 to E99	Analysatoren har en fatal feil. Ring din lokale PTS Diagnostics representant.

**Gjenta testen forsiktig med en ny testkasett og et nytt riste-sett.